

PASSO A PASSO

Instalação Passo a Passo do **Implante Expansor Ósseo Wedge**





PASSO 1

Marcação e perfuração da cortical óssea com broca de pequeno diâmetro, compatível com a espessura do rebordo. Usualmente utilizadas brocas esférica ou lança.



PASSO 2

Preparação do leito cirúrgico com broca tipo Zekrya, com movimento de aprofundamento e em seguida movimentos mesiodistais com extensão maior que o diâmetro da plataforma do implante. Na falta de espaço interdental ou entre raízes, faz-se a preparação vestibulo palatino para instalação do implante a 90°.



PASSO 3

Finalização da loja cirúrgica com o Formador (Cód. 1240, 1241, 1242, 1243, 1399 e 1518) correspondente à plataforma e ao comprimento do implante, através do Batedor (Anterior - Cód. 98 ou Posterior - Cód. 99), com leves toques, utilizando-se o Martelo Cirúrgico (Cód. 1680).




PASSO 4

Retirada do Formador da loja cirúrgica com o Sacador (Cód. 183).



PASSO 5

Captura do implante Wedge na embalagem com o Montador (Curto - Cód. 1244 ou Longo - Cód. 1245) e transporte à loja cirúrgica com o Montador inserido.

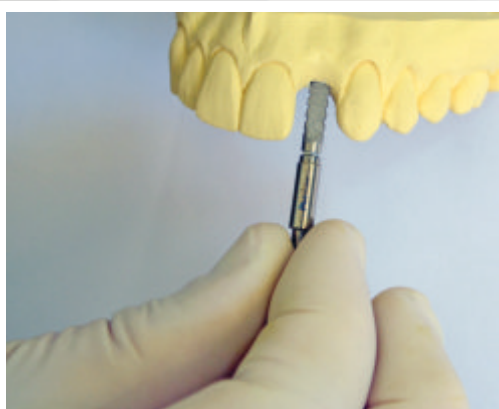

PASSO 6

Introdução inicial do implante Wedge na loja cirúrgica através do Montador.



PASSO 7

Inserção do implante através do Montador e do Batedor (Anterior ou Posterior), com leves toques, utilizando-se o Martelo Cirúrgico.