


PASSO A PASSO

Gabaritos de Marcação da Loja Cirúrgica

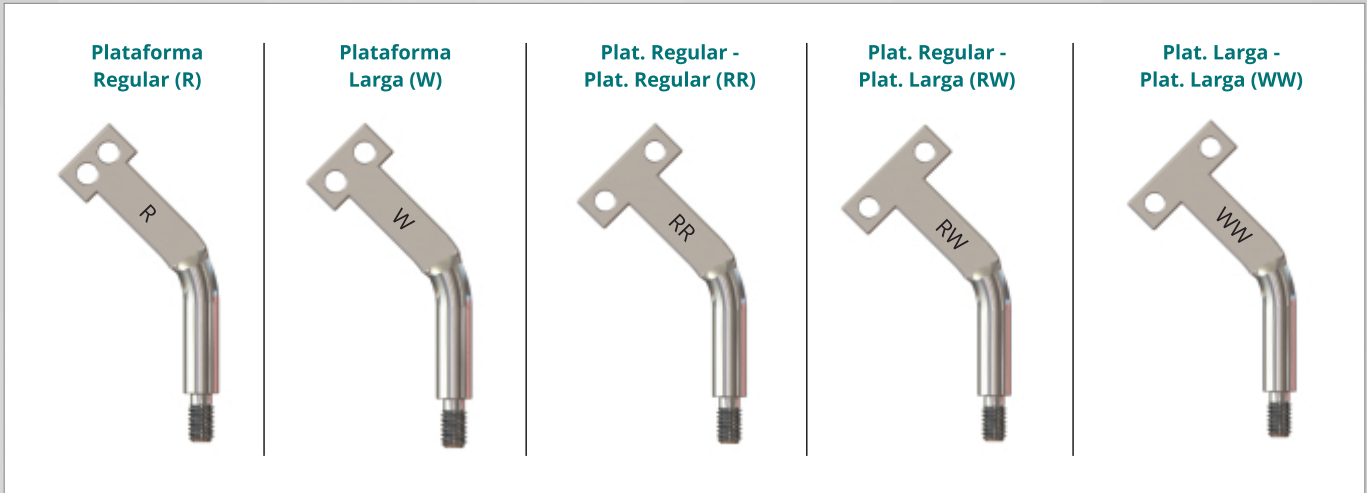



Uso dos **Gabaritos de Marcação da Loja Cirúrgica** para marcar com precisão o local da loja segundo protocolo cirúrgico.

Brocas opcionais: Lança, Esférica ou Helicoidal 2,0 mm




MARCAÇÃO À DISTAL

Marcação à distal da loja cirúrgica, de superfície dental ao centro do implante. Distância da lateral do dente ao centro do implante:
 Plataforma Regular (R) = 5 mm
 Plataforma Larga (W) = 6 mm



MARCAÇÃO À MESIAL

Marcação à mesial da loja cirúrgica, de superfície dental ao centro do implante. Distância da lateral do dente ao centro do implante:
 Plataforma Regular (R) = 5 mm
 Plataforma Larga (W) = 6 mm

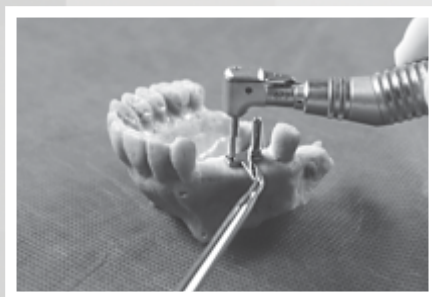

MARCAÇÃO ENTRE IMPLANTES

Marcação da loja cirúrgica entre implantes. Utiliza-se um pino de paralelismo inserido na marcação anterior para auxiliar na marcação seguinte. Distância entre centro de implantes:
 Plataforma Regular - Plataforma Regular (RR) = 7 mm
 Plataforma Regular - Plataforma Larga (RW) = 8 mm
 Plataforma Larga - Plataforma Larga (WW) = 9 mm